



Manual de instrucțiuni

Aplicația Bon Image destinată Microscopului pentru Operații Chirurgicale DOM3000D pro

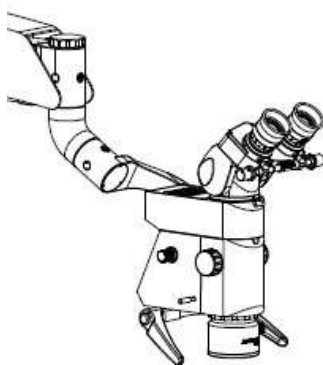

1. Descărcați aplicația „**Bon Image**” de pe Android market sau din APP Store și instalați-o.

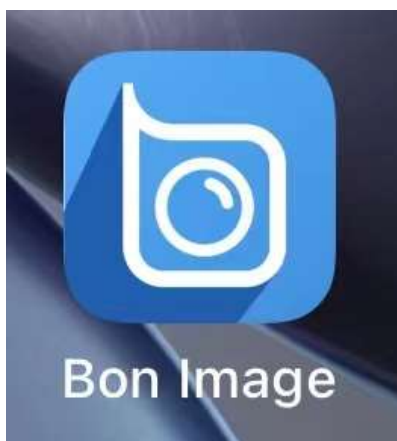


2. Microscopul este pornit. În acest moment, camera 4K încorporată este pornită și se aude semnalul sonor.

3. Intrați în pagina de setări WIFI a telefonului mobil, conectați
SSID: Semorr_*****, parola de conectare este:
12345678


4. Rulați „**Bon Image**”, apăsați pe „Despre”



5. Pentru prima autentificare, apăsați pe „**Șterge memoria cache**”

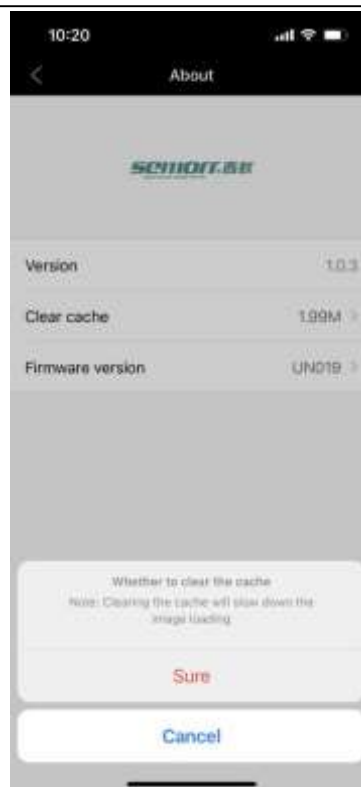

6. După ce ați șters memoria cache, apăsați pe „Conectare”

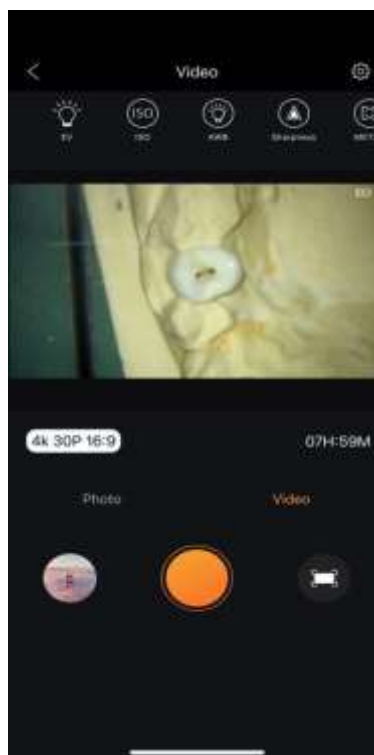

7. Apăsați pe pictograma mică (DIN STÂNGA) din imaginea de mai sus pentru a afișa fotografia sau videoclipul pe care l-a realizat camera

Selectați fișierul dorit și descărcați-l local (pe mobil)

8. Apăsați pe pictograma cu pinion din figura de mai sus pentru a personaliza parametrii camerei

9. În figura următoare este prezentată interfața de configurare a camerei. Înainte de fotografiere, pot fi efectuate setările aferente necesare




10. Dacă există o eroare a marcatului temporal al imaginii fotografiate de cameră, puteți apăsa pe „Configurare oră” (în acest moment, ora camerei este sincronizată cu cea locală (telefonul mobil))



11. Cardul de memorie este încorporat în modulul camerei. Dacă doriți să exportați imagini și clipuri video, vă rugăm să le descărcați prin intermediul Aplicației pentru telefon. Dacă este necesar, cardul de memorie poate fi formatat **(Asigurați-vă că salvați datele înainte de formatare)**. Dimensiunea fișierului video depinde de rezoluția video și de frecvența cadrelor. Camera acceptă un card de memorie Micro SD cu o capacitate maximă de 256 GB.

Subsemnata, **ALBAN DIANA CORINA**, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. **16992**, certific exactitatea traducerii documentului prezentat din limba engleză în limba română, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR,

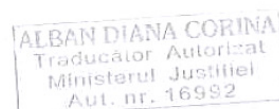

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alban", written over the stamp.